

## AED使用の手順

### 5. 心電図の解析

電極パッドが肌にしっかり貼られると、「傷病者から離れてください」との音声メッセージとともに、AEDは心電図の解析を自動的に始めます。周囲の人にも傷病者から離れるよう伝え、誰も傷病者に触れていないことを確認してください(図)。誰かが傷病者の体に触れていると、振動で心電図の解析がうまく行われな可能性がります。

一部の機種では心電図の解析を始めるために「解析ボタン」を押す必要があります。AEDの音声メッセージに従ってください。



図 誰も傷病者に触れていないことを確認する